

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Kropia Plus

NAWILŻAJĄCE

Sterylnie krople do oczu bez środka konserwującego

Czym są krople Kropia Plus ?

Kropia Plus jest sterylnym roztworem hialuronianu sodu 3 mg/ml.

W jakim celu stosuje się krople Kropia Plus ?

Kropia Plus przeznaczona jest do intensywnego nawilżenia gałki ocznej przy jej suchości, wywołanej negatywnym wpływem otaczającego środowiska, powodującego zaburzenia typu: suche oko, odczucie obecności ciała obcego w oku, pieczenie oczu, a także po zabiegach operacyjnych przeprowadzanych na oku.

Kiedy należy stosować krople Kropia Plus ?

Krople Kropia Plus należy stosować w stanach niedoboru łez (tzw. Zespół "suchego oka"), którym towarzyszą takie objawy jak: uczucie suchości oka, pieczenie lub zmęczenie oczu. Przyczyną tych objawów może być: praca przy komputerze, długotrwałe oglądanie telewizji, suche powietrze w pomieszczeniach ogrzewanych lub klimatyzowanych bądź dym papierosowy. Zmniejszenie wydzielania łez może nastąpić również w wyniku zabiegów operacyjnych lub zranień oczu, aby proces regeneracji powierzchniowych struktur oka przebiegał prawidłowo, potrzebne jest stałe nawilżenie. Kropia Plus zawiera wysokie stężenie hialuronianu sodu, przez co rogówka i spojówka oka są długotrwałe nawilżane.

W jaki sposób działają składniki aktywne kropli Kropia Plus ?

Hialuronian sodu - naturalnie występujący polisacharyd w organizmie człowieka, w tym w ciałku szklistym oka, powszechnie znany jest jako substancja silnie nawilżająca. Właściwości mukoadhezyjne kwasu hialuronowego zapewniają lepsze przyleganie preparatu do powierzchni oka, co ma wpływ na szybsze gojenie się nabłonka rogówki, natomiast dzięki właściwościom wiskoelastycznym (lepkosprężystym), wpływa na zwiększenie stabilności filmu łzowego, który jest znacznie wolniej wypłukiwany podczas mrugania.

Elektrolyty (chlorek sodu, wapnia, potasu, magnezu) - przedrogówkowy film łzowy, który pokrywa rogówkę i spojówkę jest bogaty w elektrolyty tj.: sód, potas, chlor, magnez i wapń. Elektrolyty odgrywają kluczową rolę w homeostazie powierzchni oka i łagodzeniu objawów Zespołu suchego oka (ZSO).

Osmoprotektanty - substancje o działaniu osmoprotekcyjnym to małe cząsteczki, które wykorzystują różne komórki do odbudowy izotonicznej objętości komórek oraz do stabilizacji białek umożliwiając adaptację do hiperosmolarności. Głównym problemem w Zespole suchego oka jest hiperosmolarność filmu łzowego, co ma wpływ na uszkodzenie nabłonka rogówki i komórek kubkowych spojówki. Glicerol (gliceryna) posiada właściwości higroskopijne (wiążania wody). Roztwory glicerolu w postaci kropli do oczu stosowane są w celu zapewnienia długotrwałego nawilżenia, dzięki czemu łagodzą uczucie suchości oczu jak i zapobiegają przewlekłym podrażnieniom lub stanom zapalnym.

Dla kogo dedykowane są krople Kropia Plus ?

Krople do oczu Kropia Plus dedykowane są dla dzieci powyżej pierwszego miesiąca życia oraz dla osób dorosłych.

Jak często można stosować krople Kropia Plus ?


W razie potrzeby należy zakropić jedną kroplę do worka spojówkowego. Ponieważ krople Kropia Plus nie zawierają konserwantów, mogą być używane codziennie, również przez użytkowników wszystkich typów soczewek kontaktowych. Zwykle zakrapla się 3 - 4 razy dziennie po jednej kropli do worka spojówkowego każdego oka. Przy nasilonych dolegliwościach można zakraplać częściej.

Jak stosować krople Kropia Plus ?

Krople do oczu Kropia Plus należy stosować tylko zewnętrznie do worka spojówkowego.



1. Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce.

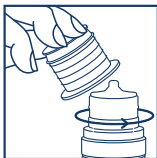


2. Przed każdym użyciem zdjąć osłonkę zabezpieczającą z zakraplacza. Nie dotykać końcówki zakraplacza.



3. Lekko odchylić głowę do tyłu.
4. Butelkę trzymać otworem do dołu (pionowo).
5. Dolną powiekę odciągnąć nieco do dołu, wkropić jedną kroplę do worka spojówkowego, naciskając butelkę.



6. Po zakropieniu należy zamknąć powieki i ruszając gałką oczną, rozprowadzić krople na powierzchni oka.
7. Te same czynności powtórzyć dla drugiego oka.

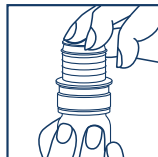

8. Po użyciu należy założyć osłonkę zabezpieczającą na zakraplacz. Podczas zakraplania trzeba uważać, by nie dotknąć końcówką zakraplacza powierzchni oka oraz powieki.
9. Po zastosowaniu preparatu nie zakraplać / płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.

Kiedy nie należy stosować kropli Kropia Plus ?

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu.

Co zawierają krople Kropia Plus ?

hialuronian sodu 3 mg/ml, gliceryna, chlorek sodu, kwas borowy, tetraboran sodu, chlorek wapnia, chlorek potasu, chlorek magnezu, woda wysokococzyszczona.

Na co należy zwrócić uwagę podczas przechowywania kropli Kropia Plus ?

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Trzymać z dala od źródeł ciepła.
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu.
- Od daty pierwszego otwarcia, stosować nie dłużej niż 30 dni w sposób ciągły i nie dłużej niż 90 dni w sposób nieciągły (uwzględniając kilkudniowe przerwy podczas aplikacji).
- Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Preparat przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nigdy nie dotykać końcówką zakraplacza oka lub innych powierzchni, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie roztworu.
- W przypadku używania innych leków okulistycznych, powinno upłynąć co najmniej 15 minut zanim zakroplimy oczy kroplami Kropia Plus.
- Preparat ten należy podawać jako ostatni.
- Wyrób medyczny do wielokrotnego użytku powinien być stosowany wyłącznie przez jedną osobę.

Zgłaszanie incydentów medycznych lub działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Incydenty medyczne lub działania niepożądane można zgłaszać Producentowi wypełniając przygotowany formularz, który jest dostępny na stronie internetowej firmy <http://www.s-lab.pl/> lub listownie na adres: SUPROBION Sp. z o.o. Sp. k. ul. Kielczowskiej 2 55-095 Mirków

Incydenty medyczne można zgłaszać bezpośrednio Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, e-mail: incydenty@urpl.gov.pl, Faks: +48 22 492 11 29

Dostępne opakowania

Krople do oczu 10 ml



SUPROBION Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Kielczowska 2
55-095 Mirków, Poland

Dystrybutor:

S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kielczowska 2
55-095 Mirków, Poland



STERILE A

11380D_PL

Data opracowania instrukcji: 05.2021