

Czym są plastry BLIZNASIL?

Innowacyjne plastry silikonowe BLIZNASIL są przeznaczone do leczenia wszelkiego rodzaju blizn, ze szczególnym uwzględnieniem blizn po cesarskim cięciu. Wykorzystują one potwierdzone naukowo właściwości medycznego silikonu, który jest uznawany za najskuteczniejszy składnik w leczeniu blizn. Odtwarzają naturalną barierę właściwą dla zdrowej skóry. Regularnie stosowane zmniejszają widoczność i wielkość blizn oraz wyrównują ich koloryt. Uelastyczniają blizny oraz znoszą uczucie napięcia i świądu.

Dodatkowo plastry BLIZNASIL, pokryte jedwabistym, elastycznym materiałem, zapewniają idealne dopasowanie do powierzchni ciała, pozwalają skórze oddychać, chroniąc jednocześnie delikatną bliznę przed ewentualnymi podrażnieniami i otarciami spowodowanymi przez ubranie. Ponadto cielisty materiał zapobiega rolowaniu i odklejaniu plastra, zapewnia komfort oraz dyskretność stosowania.

Rozmiar plastrów jest dopasowany do długich blizn, szczególnie po cesarskim cięciu, jednak każdy plaster można dopasować do mniejszej blizny przez docięcie. Plaster należy docinać przed odklejeniem folii zabezpieczającej, pamiętając o pozostawieniu co najmniej 5 mm zapasu od krawędzi blizny do końca plastra. Przy bardzo rozległych lub długich bliznach poszczególne plastry lub ich fragmenty można dowolnie łączyć, naklejając kolejne z nich obok siebie.

Jak działają plastry BLIZNASIL?

- Zmniejszają widoczność i wielkość blizn, wyrównują ich koloryt
- Uelastyczniają blizny, znoszą uczucie napięcia i świądu
- Chronią delikatne blizny przed podrażnieniem przez ubrania
- Zmniejszają ryzyko powstania blizn przerostowych i bliznowców (keloidów) oraz łagodzą objawy związane z powstałymi już bliznami nieprawidłowymi

Na jakie blizny można stosować plastry BLIZNASIL?

Plastry BLIZNASIL można stosować na każdą bliznę, bez względu na sposób i czas jej powstania. Plastry BLIZNASIL są przeznaczone do leczenia następujących rodzajów blizn:

- Blizny po cesarskim cięciu
- Blizny po operacjach chirurgicznych
- Blizny po operacjach plastycznych
- Blizny po terapiach laserowych
- Blizny pourazowe
- Blizny pooperacyjne
- Blizny przerostowe
- Bliznowce (keloidy)

Plastry BLIZNASIL można stosować zarówno na blizny nowe (do 6 miesięcy), jak i dojrzałe (nawet po upływie 10 lat od momentu ich powstania), choć leczenie blizn nowych z reguły trwa krócej – od 1 do 2 miesięcy. W wypadku blizn dojrzałych ich leczenie może trwać do 6 miesięcy.

Plastry BLIZNASIL są łagodne i bezpieczne, dlatego mogą być stosowane u dorosłych (także ze skłonnościami do uczuleń i alergii) oraz u dzieci bez względu na wiek.

Jak stosować plastry BLIZNASIL?

- Leczoną bliznę należy umyć i osuszyć. Nie stosować na okolice blizny preparatów nawilżających ani olejków, aby nie zmniejszyć przylepności plastra. Wyjąć plaster z opakowania. W razie potrzeby dociąć przy użyciu nożyczek do odpowiedniej wielkości lub kształtu blizny, pamiętając o pozostawieniu 5 mm marginesu.
- Usunąć folię zabezpieczającą z plastra i nakleić go bezpośrednio na bliznę. Lekko docisnąć plaster, zaczynając od jego środkowej części i wygładzając w kierunku brzegów. Plaster powinien pozostawać na skórze przez co najmniej 12 godzin na dobę.

- Przynajmniej raz dziennie należy plaster zdjąć, przemyć bliznę mydłem bez substancji nawilżających, następnie ponownie nakleić plaster. Na czas mycia blizny lub przerwy w kuracji, plaster można odłożyć na podkładkę dołączoną do opakowania, klejącą stroną do dołu. Jeden plaster można stosować nawet przez 14 dni.
- W razie potrzeby plaster można umyć, używając do tego wody i zwykłego mydła (bez substancji nawilżających). W tym celu należy plaster zwilżyć, delikatnie namydlić i wyczyścić, stosując koliste ruchy kciukami po powierzchni plastra. Następnie plaster należy wypłukać i pozostawić do wyschnięcia na załączonej podkładce, układając plaster tkaniną do góry, a stroną z silikonem przyklejoną do podkładki. W razie potrzeby, kontynuować proces leczenia blizny przez naklejenie nowego plastra. Mycie plastra pomiędzy jego zastosowaniami pomaga przywrócić jego właściwą przylepność, a jednocześnie nie ma wpływu na jakość i działanie warstwy silikonowej.
- Plastry BLIZNASIL są samoprzylepne, jednak w wypadku stosowania ich w okolicy stawów (szczególnie kolana, łokcia i barku) można dodatkowo użyć plastra medycznego, aby zapewnić właściwe przyleganie plastra BLIZNASIL do blizny i zapobiec jego odklejaniu.

Czy plastry BLIZNASIL wykazują działania niepożądane?

Plastry BLIZNASIL są łagodne i bezpieczne. W wypadku wystąpienia zaczerwienienia lub podrażnienia skóry, należy przerwać stosowanie plastrów i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak przechowywać plastry BLIZNASIL?

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Uwaga!

- Nie stosować na niezagojoną ranę
- Nie stosować na nałożone wcześniej preparaty zawierające antybiotyki lub inne leki
- Unikać kontaktu z oczami, błonami śluzowymi i ranami
- Tylko do użytku zewnętrznego

Plastry Bliznasil są dostępne w opakowaniu zawierającym 3 lub 5 sztuk o wymiarach 3,5 x 17 cm oraz podkładkę do odkładania plastrów.

Produkty do leczenia blizn marki BLIZNASIL:

- **Żel na blizny hypoalergiczny** – silikonowy, bezzapachowy żel do leczenia wszelkiego rodzaju blizn, przeznaczony szczególnie dla osób ze skórą wrażliwą oraz skłonnością do alergii i uczuleń
- **Żel na blizny forte** – silikonowy, bezzapachowy żel do leczenia wszelkiego rodzaju blizn, wzbogacony o filtr SPF 15, ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, witaminę C i witaminę E
- **Plastry na blizny po cesarskim cięciu, operacjach i urazach** – innowacyjne plastry silikonowe przeznaczone do leczenia wszelkiego rodzaju blizn, ze szczególnym uwzględnieniem blizn po cesarskim cięciu