

INSTRUKCJA UŻYWANIA WYROBU MEDYCZNEGO

Remo-Wax®, krople do usuwania woskowiny usznej

Wskazania do stosowania

Krople do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax rozpuszczają korek woskowinowy i zapobiegają jego powstawaniu.

Nie należy stosować Remo-Wax w przypadku:

- stanu zapalnego lub bólu ucha,
- wydzieliny z ucha,
- uszkodzonej, przedziurawionej lub przebitej błony bębenkowej (np. dren po nakłuciu błony bębenkowej),
- uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników kropli Remo-Wax.

Specjalne grupy pacjentów

Jeśli pacjent ma problemy z koordynacją, zaburzenia ruchowe lub drżenie rąk, należy poprosić kogoś o podanie kropli do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax do przewodu słuchowego i przepłukanie uszu zgodnie z instrukcją.

Dzieci

Remo-Wax może być stosowany u dzieci według uznania lekarza. Należy postępować zgodnie z podanymi instrukcjami. W celu wykonania płukania uszu u dzieci zaleca się odwiedzenie lekarza lub pielęgniarki.

Użytkownicy aparatów słuchowych

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy umieścić go na miejscu dopiero po zakończeniu płukania i wypłynięciu wody z ucha.

Możliwe działania niepożądane

W rzadkich przypadkach występowały reakcje alergiczne związane ze stosowaniem kropli Remo-Wax. Może wystąpić nieprzyjemne uczucie w kanale słuchowym, podrażnienie skóry i przemijające zawroty głowy.

Jeśli gumowa gruszka jest wsunięta głęboko do przewodu słuchowego, może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej.

W przypadku podejrzenia, że krople do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax spowodowały działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak używać kropli do usuwania woskowiny usznej i gumowej gruszki

Rozpuszczanie korka woskowinowego przy użyciu kropli do uszu

- Ogrzać zawartość butelki Remo-Wax do temperatury ciała (około 37°C) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.
- Przechylić głowę w kierunku barku lub położyć się z głową zwróconą na bok i podać do ucha od 10 do 20 kropli Remo-Wax. Pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Można wprowadzić do ucha mały tampon z bawełny zwilżony kilkoma kroplami Remo-Wax.
- Pozostawić Remo-Wax w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby można pozostawić roztwór w uchu na noc.

Po użyciu kropli do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax przewód słuchowy musi zostać przepłukany. W celu przepłukania uszu można użyć gruszki gumowej Remo-Wax lub udać się do lekarza lub pielęgniarki. Zaleca się by płukanie uszu u dzieci było wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę.

Płukanie ucha przy użyciu gumowej gruszki

- Gruszkę należy umyć i przepłukać przed każdym użyciem.
- Nabrać do gruszki wody o temperaturze ciała.
- Wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do kanału słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płukać ucho, delikatnie i bez pośpiechu ściskając gruszkę.
-

Nie należy wprowadzać końcówki gruszki w głąb przewodu słuchowego!

- Powtórzyć płukanie kilka razy, aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta.
- Po zakończonym zabiegu gruszkę należy umyć i wycisnąć do pusta w celu usunięcia zawartości. Należy pozostawić gruszkę, kierując końcówkę gruszki do dołu, tak aby znajdująca się w niej woda mogła wypłynąć.

Jeśli nie udało się rozpuścić korka woskowinowego, podawanie kropli i płukanie uszu można powtarzać przez kolejne trzy dni.

Stosując Remo-Wax regularnie raz w miesiącu można uniknąć ponownego powstania korka woskowinowego. **Uwaga!** Przepłukać ucho po każdym zabiegu.

Jeśli pacjent ma zamiar odwiedzić lekarza lub pielęgniarkę w celu wykonania płukania ucha, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

Płukanie ucha nie powinno powodować bólu. Jeśli pacjent odczuwa ból, należy przerwać płukanie ucha i skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem kropli Remo-Wax należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Skład:

alantoina, lanolina etoksylogowana, polisorbata 80, polisorbata 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy, eter polioksyetyleno-oleilowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z tłuszczu norek, alkohol fenoloetylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetoniowy, woda.

Gruszka: polichlorek winylu (PVC)

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Krople Remo-Wax i gruszkę przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie używać po upływie daty wydrukowanej na opakowaniu.

Wielkości opakowań

Remo-Wax 10 ml

Remo-Wax 10 ml z gumową gruszką

Wytwórca

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finlandia

Przedstawiciel wytwórcy w Polsce

Orion Pharma Poland Sp. z o.o.

ul. Grochowska 278 lok. 31
03-841 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji niniejszej instrukcji używania: 02.06.2016

<+ Oznakowanie CE>

<+ Oznakowanie logo wytwórcy>