

INSTRUKCJA WYKONANIA TESTU

Przed wykonaniem badania zapoznaj się z instrukcją.
Test ciążowy płytkowy do samodzielnego zastosowania wykrywający hormon hCG o stężeniu równym lub wyższym niż 25mIU/ml.

WYKONANIE BADANIA

Test wykrywa hormon hCG, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu. Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny. Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.

- **W przypadku uzyskania wyniku dodatniego:** należy udać się do lekarza, aby potwierdzić ciążę i dowiedzieć się, jak należy dalej postępować.
- **W przypadku uzyskania wyniku ujemnego:** należy wykonać badanie nowym testem ciążowym, jeśli miesiączka nie pojawi się w ciągu tygodnia. Jeśli ponownie wynik będzie ujemny, a miesiączka nie pojawi się, należy udać się do lekarza po poradę.

UWAGA

Możliwe jest uzyskanie wyniku fałszywie dodatniego spowodowane przyjmowaniem leków zawierających hormon hCG (takich jak: Pregnyl, Profasi, Pergonal, APL), ciążą pozamaciczną oraz niektórymi schorzeniami podnoszącymi poziom hCG. Na wynik nie powinny wpływać: alkohol, doustne środki antykoncepcyjne, środki przeciwbólowe, antybiotyki lub leki nie zawierające hCG. Poza tym w przypadku niektórych schorzeń, np. torbieli jajnika, ciąży pozamacicznej mogą występować podwyższone poziomy hCG, co może prowadzić do uzyskania wyniku fałszywie dodatniego.



Przechowywać w temperaturze 2-30°C



Przed wykonaniem badania zapoznać się dokładnie z instrukcją



Test do diagnostyki in vitro



Do jednorazowego użycia



Oznakowanie wyrobu medycznego zgodnego z Dyrektywą WE

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zużyty test usuwać jak odpad domowy.

Nie używać testu z uszkodzoną kopertką foliową.

Data ostatniej weryfikacji ulotki: 25.06.2014



Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.
ul. T. Zana 4, 04-313 Warszawa
www.hydrex.pl